

Technisches Datenblatt / Stand / Status: 2019-11

Technical Data Sheet

Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher / Medizid® Alpha+ XXL Disinfectant Wipes

Unsere gebrauchsfertige Sprühwischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von allen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere für alkoholempfindliche Oberflächen / Our ready-to-use spray wipe disinfection for cleaning and disinfection of all surfaces of medical devices, especially surfaces sensitive to alcohol.

REF	Versandeinheit / shipping unit	Größe / size	Eimer / Nachfülltücher / bucket / refill cloths	PZN
00969+	70 Tücher / cloths	26 x 29 cm	Eimer / bucket	16015179
00970+	70 Tücher / cloths	26 x 29 cm	Nachfülltücher / refill cloths	16015162



Allgemeine Informationen / general information

Charakteristik / characteristics

- Gebrauchsfertig / ready to use
- Alkohol- und aldehydfrei / alcohol and aldehyde free
- Schnell und umfassend, bereits ab 60 Sek. Wirksam / fast and comprehensive, already from 60 sec. effective
- Umfassend bakterizid und levurozid wirksam / comprehensively bactericidal and levurocidal effective
- Wirksam gegen alle behüllte Viren: BVDV/ Vaccinia (inkl. HCV/HBV/HIV) / effective against all enveloped viruses: BVDV / Vaccinia (incl. HCV/HBV/HIV)
- Wirksam gegen alle unbehüllten Viren: Rota, Polyoma/SV40 / effective against all non-enveloped viruses: Rota, Polyoma/SV40
- Begrenzt viruzid PLUS wirksam / limited virucidal PLUS effective
- Hohe Materialverträglichkeit, für empfindliche Oberflächen, wie Acrylglas geeignet / high material compatibility, suitable for sensitive surfaces such as acrylic glass
- Rückstand nicht klebend / residue not adhesive
- Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und Der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren / tested according to DGHM standard methods and RKI recommendations for efficacy against viruses
- VAH gelistet / VAH listed

Anwendungshinweise / application notes

Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und Pflegeheime. Unverdünnt anwenden, Oberflächen und Gegenstände vollständig benetzen, 1 Minute einwirken lassen. Einwirkzeit : KONZ. / 1 MINUTE. / For medical facilities, sanitary and bath areas and nursing homes. Apply undiluted, wet surfaces and objects completely, allow to act for 1 minute. Contact time : CONC./1 MINUTE.

Zusammensetzung / composition

In 100 g sind enthalten:
0,2 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid,
0,64 g Didecyldimethylammoniumchlorid.
In 100 g are contained: 0,2 g
polyhexamethylenebiguanidehydrochloride, 0,64 g
didecyldimethylammoniumchloride.

Haltbarkeit / durability

Die Mindesthaltbarkeit der Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Verpackung / Dose / Eimer direkt nach Gebrauch wieder verschließen. Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 28 Tage. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt. / The minimum durability of Medizid® Alpha+ XXL disinfectant wipes is 3 years (see label printing). To prevent premature drying of the wipes, close the packaging / can / bucket immediately after use. Shelf life / service life after opening: 28 days. Provided that the products are stored exclusively in the well sealed original containers, that any contamination during product removal is avoided and that the storage of the opened containers is carried out under standard conditions (protection from moisture, direct sunlight, heat and frost) in the range of 5 - 25 °C.

Allgemeine Hinweise / general instruction

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. / The recommendations for our preparations are based on scientific tests and are given to the best of our knowledge. Further recommendations, e.g. with regard to material compatibility, are only possible separately. Our recommendations do not exempt our customers from testing our preparations for their suitability for the intended purposes and processes. In this respect we cannot assume any liability.