

Technisches Datenblatt / Stand / Status: 2019-11

Technical Data Sheet

Medizid® Rapid+

Hochwirksame, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen und Gegenstände



REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
01002+	250 ml	12 Flaschen	16015216
00975+	500 ml	18 Flaschen	16015222
00976+	1 L	12 Flaschen	16015239
00977+	5 L	2 Kanister	16015245

Allgemeine Informationen

Präparatetyp

- VAH zertifiziert
- Aldehydfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA),
- Levurozid wirksam
- Fungizid wirksam
- Mykobakterizid wirksam
- Tuberkulozid wirksam
- Viruzid wirksam

Produktinformation

Medizid® Rapid+ ist eine gebrauchsfertige, alkoholhaltige Sprühwischdesinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen, Medizinprodukten und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen Behandlungen und Eingriffen, besonders, wenn kurze, praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit Medizid® Rapid+ benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht geeignet für die Desinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

Zusammensetzung

Wirkstoffe in 100 g:
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
63,5 g Ethanol.

Haltbarkeit

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung
Haltbarkeit / Standzeit nach Anbruch: 12 Monate

Allgemeine Hinweise

Vorsicht bei alkoholempfindlichem Material. Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

Regulatorische Information

Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG.